

schülke -†



Dezinfectant rapid pe bază de alcool
pentru produse medicale non-invazive și
alte suprafețe

mikrozid® AF liquid

Avantajele produsului nostru:

- soluție gata preparată
- activitate biocidă foarte extinsă, în cel mai scurt timp posibil
- uscare rapidă fără a lăsa urme

Aria de aplicare

Produsul este adecvat pentru dezinfecția dispozitivelor medicale și a altor suprafețe. Produsul nostru clasic printre cele pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor este adecvat pentru dezinfecția suprafețelor din proximitatea pacienților care prezintă un risc ridicat de infecție și necesită un timp scurt de acțiune.

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați produsul nediluat pe suprafețe, ștergeți și așteptați ca acesta să își facă efectul. Asigurați-vă că ați umezit complet suprafețele și păstrați-le umede pe întreaga durată a timpului de expunere. Coeficientul maxim de aplicare va fi de 50 ml/m pătrat. Asigurați-vă că ați îndepărtat toată murdăria vizibilă înainte de dezinfecție. Orice incident serios legat de produs trebuie raportat producătorului și autorităților competente. A nu se folosi pentru dezinfecția finală a echipamentelor medicale semi-critice și critice!

Eficiență microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bactericid EN13727, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
tuberculocid EN14348 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
levuricid EN13727, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
fungicid EN13624, EN13697 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	2 min.
virucid împotriva virusurilor capsulate În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)// Instrucțiunile RKI	Gata de utilizare	30 sec.
Norovirus EN14476 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
Polioma SV40 În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)// Instrucțiunile RKI	Gata de utilizare	10 min.
Rotavirus În conformitate cu DVV	Gata de utilizare	30 sec.
Adenovirus (tip 5) În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)// Instrucțiunile RKI	Gata de utilizare	5 min.

CertIFICATE:

- Certificat VAH
- Înregistrat IHO
- Certificat ÖGHMP



CE 0297